

# TÊTE HELMET






# INDICATIONS

## CHIRURGIE DE PREMIÈRE INTENTION OU DE REPRISE

- Omarthrose excentrée
- Echec d'une héli-arthroplastie
- Echec d'une arthroplastie totale d'épaule
- Rupture massive de la coiffe des rotateurs
- Stock osseux glénoïdien insuffisant
- Fracture de glène
- Problème neurologique (paralysie axillaire)

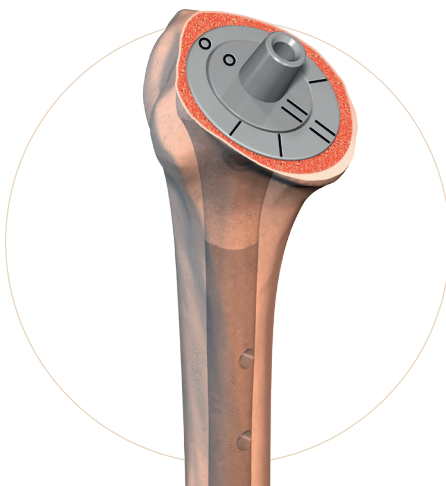

## CHOIX DU DIAMÈTRE DE LA TÊTE

S'il s'agit d'une tige Humelock Reversed, insérer le cône adaptateur centré dans la tige.


S'il s'agit d'une tige Humelock ou Humeris, ou d'une base d'ancrage Easytech, insérer le double cône. Impacter le cône.

## INSERTION DE LA TÊTE HELMET

Dégager la partie latérale de l'humérus rentrant en conflit avec l'extension de l'implant d'essai, à l'aide de la scie oscillante. Faire les essais de mobilité.

Prendre l'implant définitif de la même taille que le dernier implant d'essai choisi.

Orienter l'implant définitif pour coller au dégagement effectué. Impacter l'implant définitif à l'aide de l'impacteur prévu à cet effet.

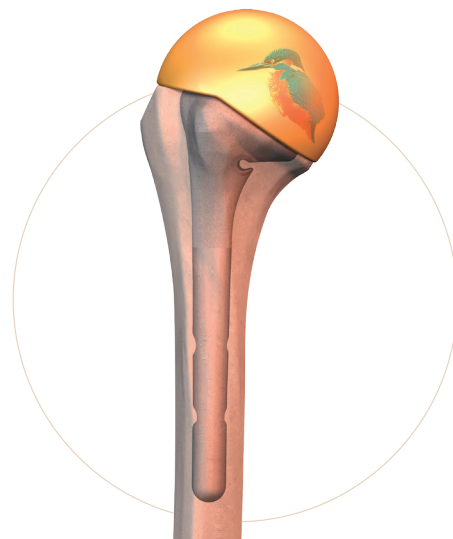

## COMBINAISONS POSSIBLES ET INTERDITES

| Tête Hemlet | Hemelock Reversed |      |      |      |      |      |      | Easytech |    |    | Humeris | Hemelock II sans cage OMS | Hemelock II + cages OMS |          |          |          |          |  |
|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----|----|---------|---------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|             | 3208              | 3210 | 3212 | 3610 | 3612 | 3614 | 4012 | 30       | 34 | 38 | 08 à 14 | 08 à 14                   | 106-2020                | 106-2021 | 106-2022 | 106-2023 | 106-2024 |  |
| 048         | OK                |      |      | OK   |      |      |      | OK       | OK |    | OK      | OK                        | OK                      | OK       |          | OK       |          |  |
| 051         | OK                |      |      | OK   |      |      |      | OK       | OK |    | OK      | OK                        | OK                      | OK       |          | OK       |          |  |
| 054         | OK                |      |      | OK   |      |      |      | OK       | OK |    | OK      | OK                        | OK                      | OK       |          | OK       |          |  |



1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France  
 Tél. : +33 (0)4 74 55 35 55  
 Fax : +33 (0)4 74 52 44 01  
 E-mail : info@fxsolutions.fr  
 www.fxsolutions.fr