

# TÊTE HELMET






# INDICATIONS

## CHIRURGIE DE PREMIÈRE INTENTION OU DE REPRISE

- Omarthrose excentrée
- Echec d'une héli-arthroplastie
- Echec d'une arthroplastie totale d'épaule
- Rupture massive de la coiffe des rotateurs
- Stock osseux glénoïdien insuffisant
- Fracture de glène
- Problème neurologique (paralysie axillaire)

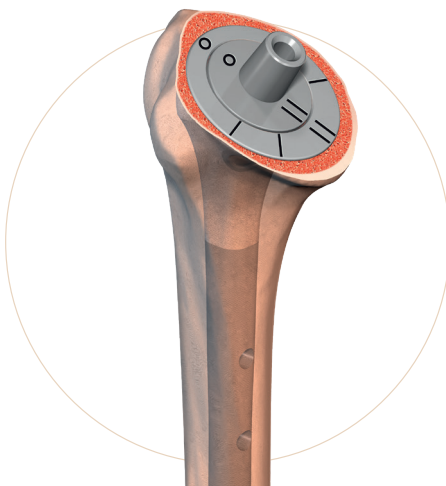

## CHOIX DU DIAMÈTRE DE LA TÊTE

S'il s'agit d'une tige Humelock Reversed, insérer le cône adaptateur centré dans la tige.

S'il s'agit d'une tige Humelock ou Humeris, ou d'une base d'ancrage Easytech, insérer le double cône. Impacter le cône.


## INSERTION DE LA TÊTE HELMET

Dégager la partie latérale de l'humérus rentrant en conflit avec l'extension de l'implant d'essai, à l'aide de la scie oscillante. Faire les essais de mobilité.

Prendre l'implant définitif de la même taille que le dernier implant d'essai choisi.

Orienter l'implant définitif pour coller au dégagement effectué.

Impacter l'implant définitif à l'aide de l'impacteur prévu à cet effet.

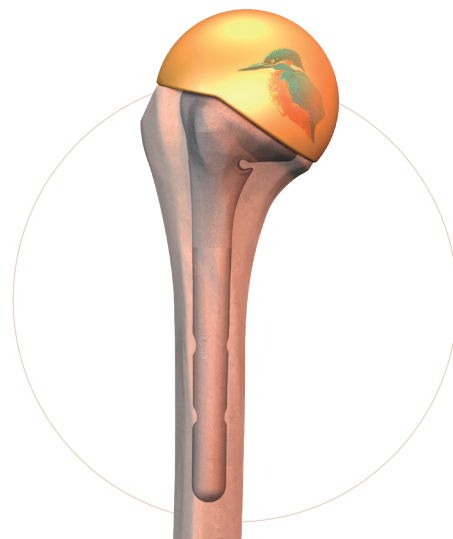

## COMBINAISONS POSSIBLES ET INTERDITES

Tête Helmet	Hemelock Reversed							Easytech			Humeris	Hemelock II sans cage OMS	Hemelock II + cages OMS				
	3208	3210	3212	3610	3612	3614	4012	30	34	38	08 à 14	08 à 14	106-2020	106-2021	106-2022	106-2023	106-2024
Ø48	OK			OK				OK			OK	OK	OK		OK		
Ø51	OK			OK				OK			OK	OK	OK		OK		
Ø54	OK			OK				OK			OK	OK	OK		OK		



1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France  
 Tél. : +33 (0)4 74 55 35 55  
 Fax : +33 (0)4 74 52 44 01  
 E-mail : info@fxsolutions.fr  
 www.fxsolutions.fr

CE1014  
 TP30-FR-08/10/21